

神奇且專業的軟體 SmartCheck!

在隱形矯正臨床操作中,對「3D動畫設計」進行確認是矯正開始前非常重要的一個環節。

牙醫生確認 3D 設計,可以根據患者的實際齒列情況對矯正方案進一步優化,可以更靈活地掌握整個 矯正過程,從而達到更完美的矯正結果。


為了方便臨床醫生對「3D動畫設計」進行確認,正雅公司設計研發了一款神奇的軟體!它是 SmartCheck ——款虛擬 3D 矯正計畫模擬工具。



通過此軟體,牙醫生不僅可以透過該軟體進行矯正設計的確認,掌握矯正進度,還可以與正雅公司的 方案設計人員進行溝通交流。

好了好了,吹了這麼久,還是說點實用的吧!來來來,小雅簡單說一些 SmartCheck 的功能。


特色功能一

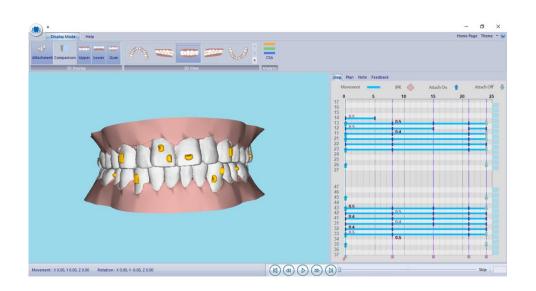




右側區域為牙齒移動進度條,顏色越深移動量越大。進度條由橙色→綠色→藍色,移動量大→中→小,方便牙醫生掌握矯正力度。

特色功能二

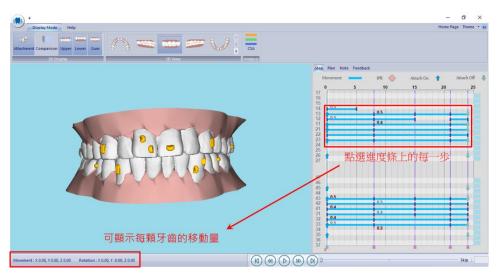

點擊右側區域牙齒移動進度條上的每一步,在左下方均會顯示每一步牙齒的移動量,方便臨牙醫生進行精確掌握或調整。


附件確認

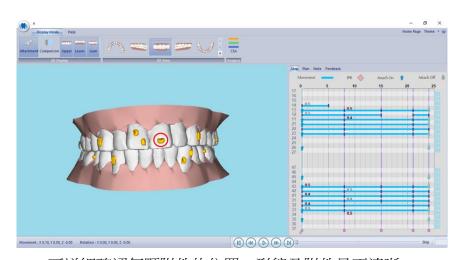

可詳細確認每顆附件的位置、形態及附件是否清晰。


牙齒移動前後對比



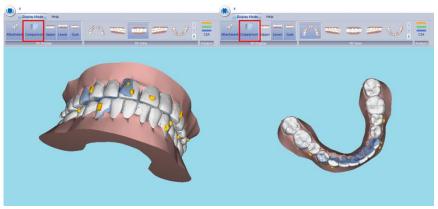


可觀察每顆需要移動牙齒的移動方向、角度及移動前後對比。

其他功能

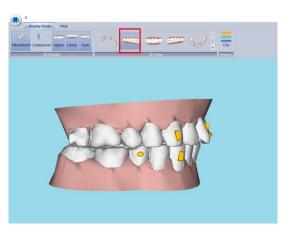

確認臼齒、犬齒咬合關係

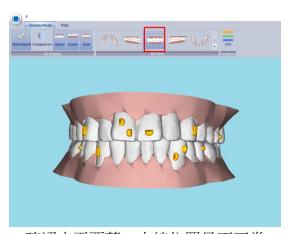

確認水平覆蓋、中線位置是否正常